

ACCU-CHEK® Multiclix



**Prélèvements faciles,
rapides et sécuritaires**

Usage quotidien **facile**

1 **POUSSEZ**

Enfoncez le bouton d'armement comme lorsque vous utilisez un stylo.



Le bouton de déclenchement transparent devient jaune.

2 **CLIQUEZ**

Appuyez l'autopiqueur contre le bout du doigt et cliquez sur le bouton de déclenchement.




Besoin d'une nouvelle lancette ?

3 **TOURNEZ**

Tournez le bouton d'armement dans la direction indiquée par la flèche jusqu'au fond, puis replacez le bouton d'armement dans sa position initiale.

Il est recommandé de toujours utiliser une nouvelle lancette.

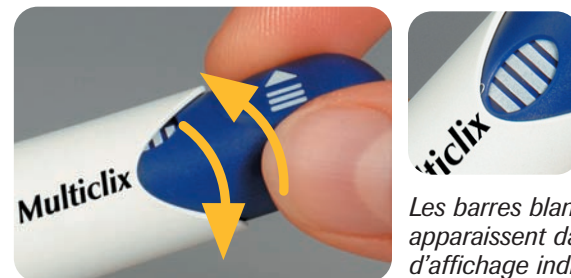

Les barres blanches qui apparaissent dans la fenêtre d'affichage indiquent combien il reste de lancettes.

Réglage du degré de profondeur et remplacement des lancettes

Avec Accu-Chek Multiclix, **CHANGEZ LA CARTOUCHE UNIQUEMENT APRÈS 6 LANCETTES .**



RÉGLEZ LE DEGRÉ DE PROFONDEUR

Sélectionnez le degré désiré en tournant la bague de réglage.

Si vous êtes débutant, optez d'abord pour le degré le plus faible (niveau 1).



INSÉREZ UNE CARTOUCHE

Retirez le capuchon. Insérez la nouvelle cartouche, bague **bleue** devant.

(Contient 6 lancettes)

Un déclic indique que la cartouche est bien insérée. Remplacez le capuchon.



CHANGEZ DE CARTOUCHE

Lorsqu'aucune barre blanche n'apparaît dans la fenêtre d'affichage, c'est que vous utilisez la dernière lancette.

Retirez le capuchon. Retirez la cartouche usagée (avec bande **rouge**).

Une cartouche usagée ne peut être rechargée ou réutilisée. Jetez-la aux ordures ménagères.

Insérez une nouvelle cartouche.

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK MULTICLIX sont des marques de commerce de Roche.
© 2008 Roche Diagnostics

www.accu-chek.ca

Roche Diagnostics

201 boul. Armand-Frappier, Laval, Québec H7V 4A2



ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.