

Accu-Chek Multiclix.



Des tests en douceur, en quelques étapes faciles



1

POUSSEZ

Enfoncez le bouton d'armement comme lorsque vous utilisez un stylo; le bouton de déclenchement devient jaune.



2

CLIQUEZ

Cliquez sur le bouton de déclenchement jaune.



Besoin d'une nouvelle lancette?

TOURNEZ

Faites un double tour. Le chiffre indique le nombre de lancettes disponibles.

- Accu-Chek Multiclix est rapide et facile à utiliser, sans lancettes visibles ou à manipuler

Changement du réglage de profondeur et remplacement de la cartouche de 6 lancettes.

Choix du réglage de profondeur désiré



RÉGLEZ LE DEGRÉ DE PROFONDEUR

Sélectionnez le degré désiré en tournant la bague de réglage. Si vous êtes débutant, optez d'abord pour le degré le plus faible (niveau 1).



Vous pouvez exécuter six tests avant de devoir changer la cartouche de lancettes



INSÉREZ UNE CARTOUCHE

Retirez le capuchon, insérez la nouvelle cartouche, l'extrémité dotée d'un anneau bleu en premier (contient 6 lancettes). Un déclic indique que la cartouche est bien en place. Remplacez le capuchon.



CHANGEZ LA CARTOUCHE

Lorsque le chiffre 1 est visible dans la fenêtre d'affichage, vous utilisez la dernière lancette*. Retirez le capuchon. Retirez la cartouche usagée (porte une bande rouge). Les cartouches utilisées ne peuvent être insérées de nouveau. Insérez la nouvelle cartouche.

*Dans les modèles dotés de barres blanches, aucune barre n'apparaîtra dans la fenêtre.

accu-chek.ca

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK MULTICLIX sont des marques de commerce de Roche.
© 2010 Roche Diagnostics. Tous droits réservés.



L'autopiqueur Accu-Chek Multiclix est conçu pour être utilisé par une seule personne.

ACCU-CHEK®